

gke Steri-Record® Typ 1 Indikatorklebeband zum Verschließen von Sterilisierpaketen

**für Dampf-, Ethylenoxid- oder Wasserstoffperoxid-
Sterilisationsprozesse**

STEAM
EO
VH2O2

Art.-Nr.	Inhalt/Pack [Rollen]	Produkt- bezeichnung	Rollen- länge [m]	Rollen- breite [mm]	Sterilisations- prozess	Farbänderung	
						vorher	nachher
211-351	12	C-S-L-1-AT	50	19	Dampf	Cremefarben	Schwarze Linien
211-352	48						
212-351	12	C-E-L-1-AT			Ethylenoxid	„Schriftzug Gas“ Rot-Braun	Grün „Gas“
212-352	48						
214-351	4	C-V-L-1-AT	25	24	Wasserstoff- peroxid	Blau-Violette Linien und Punkte	Rosa Linien und Punkte

(*) Alle Artikelnummern enthalten zusätzlich einen dreistelligen Buchstabencode, der auf die Sprachversion und mögliche Sonderanfertigungen verweist. Dieser ist auf dem Außenetikett der Verpackung, nicht aber in der oben abgebildeten Tabelle enthalten.

Anwendungsbereich

Das Indikatorklebeband wird auf die Verpackungen bzw. Pakete aufgeklebt und zur Unterscheidung von autoklavierten von nicht-autoklavierten Materialien verwendet. Der Indikator gibt jedoch nur die Information über die Sterilisiergaseinwirkung auf der Oberfläche des Pakets. Da bekannt ist, dass die Sterilisationsbedingungen im Inneren der Verpackung und in Hohlkörpern in Abhängigkeit vom Sterilisationsprozess, der Luftentfernung und der Dampfqualität vollkommen unterschiedlich sein können, ist die Anwendung eines Prozessindikators kein Ersatz für die Sterilisationsüberwachung. Der Prozessindikator gibt lediglich die logistische Information, dass das Paket einem Sterilisationsprozess ausgesetzt war, um die Verwechslung von sterilisiertem und nicht sterilisiertem Gut zu vermeiden.

Die Verwendung von Indikatorklebeband gibt keine Auskunft über die Sterilität der Beladung. Um die Sterilität der Beladung zu überwachen, muss in jeder Packung ein Typ 5 oder 6 Indikator an der schwerst zu sterilisierenden Stelle platziert werden. Für minimal-invasiv chirurgische (MIC) Instrumente ist ein validiertes Typ-2 Indikatorklebeband zum Nachweis der Sterilgas-Durchdringung und Sterilität zu verwenden.

Produktbeschreibung

Das Indikatorklebeband ist selbstklebend auf Rolle für Dampf-, Ethylenoxid- oder Wasserstoffperoxid-Sterilisationsprozesse erhältlich und ist latexfrei.

Leistungsmerkmale

Jedes Indikatorklebeband enthält einen Prozessindikator gemäß DIN EN ISO 11140-1 Typ 1.

Handhabungshinweise

1. Indikatorklebeband auf Verpackungen bzw. Pakete aufkleben.
2. Nach der Sterilisation auf Farbänderung (siehe Tabelle) prüfen.
3. Nach Gebrauch lässt sich das Klebeband leicht entfernen.

Lagerung und Entsorgung

1. Bei längerer Aufbewahrung H₂O₂-Indikatorklebeband in der Umverpackung lagern.
2. Bei Temperaturen von 5 bis 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 - 80% RH lagern.
3. Indikatorklebeband nicht gemeinsam mit Chemikalien lagern. Chemikaliendämpfe, z. B. von Wasserstoffperoxid, können den Indikator vor und nach der Sterilisation verändern.
4. Nach Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Indikatorklebeband kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Sollten Sie weitere technische Fragen haben, besuchen Sie unsere Internetseite www.gke.eu oder wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner bzw. an die **gke**-Vertriebsorganisation. Wir beraten Sie gern.

760-024 ED V01 10-2019